



For Life
Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH

Am Studio 16
12489 Berlin
Germany

mail@forlife.info
www.forlife.info

Hotline: 0800-78 666 287
(gebührenfrei)

S STOMOCUR®

**Wechsel in der
einteiligen Stomaversorgung –
dargestellt an der Urostomie**

www.forlife.info





Hilfreiche Tipps im Umgang mit der täglichen Stomaversorgung

Liebe Patientin, lieber Patient,

in der Klinik wurde Ihnen ein künstlicher Darm- oder Blasen Ausgang (Stoma) angelegt. Damit Sie wieder möglichst schnell Ihre Unabhängigkeit erlangen können, ist das Erlernen des selbständigen Versorgungswechsels wichtig. Hierbei möchten wir Ihnen helfen. Diese kleine Broschüre zeigt Ihnen anhand einer Urostomie (künstlicher Urin-Ausgang) Schritt für Schritt, wie Sie beim Wechsel Ihrer einteiligen Stomaversorgung vorgehen sollten. Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich nicht von kleineren Rückschlägen entmutigen, falls nicht alles auf Anhieb klappt.

Spezielle medizinische oder pflegerische Fragen beantworten Ihnen Ihr/e Ärztin/Arzt oder Ihr/e Stomatherapeutin/Stomatherapeut.

Bei Fragen zu unseren Produkten rufen Sie unsere gebührenfreie Hotline an: **0800-78 666 287**.

Wir möchten Ihnen nicht nur moderne und zuverlässige Produkte anbieten, sondern Sie auch mit unserem kompetenten Service unterstützen.


Ihre **FORLIFE Berlin**



1 **Legen** Sie sich alle benötigten Materialien zum Versorgungswechsel zurecht.



2 **Reinigen** Sie die Stoma umgebende Haut von außen nach innen. Bei einer Urostomie reinigen Sie bitte von innen nach außen.

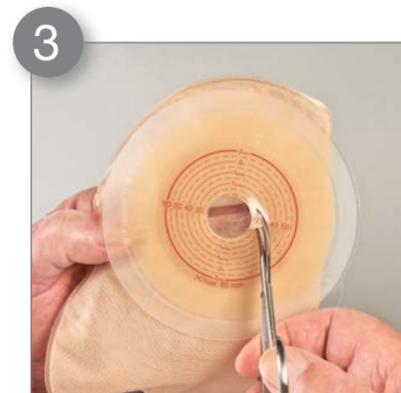

3 **Schneiden** Sie den Hautschutz Ihres Beutels auf Ihre Stomagröße zurecht.



4 **Entfernen** Sie nun die Schutzfolie vom Hautschutz Ihrer Basisplatte.



5 **Legen** Sie die Öffnung des Beutels am unteren Stomarand an und bringen Sie ihn von unten nach oben an.



6 **Modellieren** und wärmen Sie anschließend den Hautschutz gut an.



7 **Achten** Sie darauf, dass Ihre Kleidung die Versorgung nicht einengt.

Praktisches STOMOCUR®-Zubehör für eine sichere Stomaversorgung

STOMOCUR® **Hautschutzpaste**
zur äußeren Anwendung auf der Haut rund um das Stoma



STOMOCUR® **Hautschutzpuder**
Das Puder absorbiert Feuchtigkeit der Haut um das Stoma und gewährleistet somit eine bessere Haftung.



STOMOCUR® **Safety Lotion**
beugt Hautirritationen vor und ermöglicht eine schonende Ablösung der Hautschutzplatte.



STOMOCUR® **EmplaSectal**
Das handliche Spray hilft bei der leichten und hautverträglichen Entfernung der Hautschutzplatten.



STOMOCUR® **Schere**
Die praktische und ergonomisch geformte Schere dient zum genauen Ausschneiden der Basisplattenöffnungen.



Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Ihre/n betreuende/n Außendienstmitarbeiter/in.