

Gebrauchsanweisung für 3-Kammer-Beinbeutel steril

Gültig für: KBB750-10s, KBB750-50s

Beschreibung:

Der Beinbeutel ist erhältlich in der Größe 750ml. Er besteht aus PVC-Folie medizinischer Qualität und wird mit einem knickfesten PVC-Schlauch sowie Rückschlagventil gefertigt. Er setzt sich zusammen aus einem Beinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr sowie Abflussventil). Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I steril und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Der Adapter ermöglicht mittels handelsüblichem Tannenzapfen-Konnektor den Anschluss an einen weiteren Urinbeutel. Außerdem ist er mit verstärkten, dehnbaren Riemchen ausgestattet, die es erlauben, den Beutel am Patientenbein anzulegen.

Indikation:

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähig und bettlägerige Patienten geeignet.

Kontraindikation: Nein

Nebenwirkungen: Keine

Messfunktion:

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Fixieren Sie den Beinbeutel am Bein des Patienten unterhalb der Blase. Liegt der Patient, hängen Sie den Beinbeutel auf Höhe oder unterhalb der Blase auf.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor Sie den Beutel mit dem Katheter oder einem anderen Medizinprodukt verbinden. Das Austauschen des Beinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.
- Bei Verbindung des Beinbeutels mit einem Urinbeutel muss sichergestellt werden, dass die Verbindung luftdicht abgeschlossen ist.
- Der angeschlossene Urinbeutel muss sich unterhalb des Beinbeutels befinden.

Sicherheitshinweise:

- Nur für den Einmalgebrauch. Nach der Nutzung im Müll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet oder resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes beeinträchtigen und bis hin zum Funktionsausfall führen.
- Dieses Produkt sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden sein.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit lagern.

Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Sterilisiert mit Ethylenoxid



DEHP

Enthält oder Anwesenheit von Phthalaten



Nicht erneut sterilisieren



Ist ein Medizinprodukt



Nicht wiederverwenden



Hersteller



Herstellungsdatum (Datumsformat JJJJ-MM)



Verwendbar bis (Datumsformat JJJJ-MM)



Artikelnummer



Chargencode



Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden




Achtung



Trocken aufbewahren



Von Sonnenlicht fernhalten

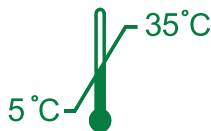

Temperaturbegrenzung



Gebrauchsanweisung beachten



CE-Kennzeichen mit Kennnummer der benannten Stelle



Anzahl / Stück



Contains Phthalates :

There are no known residual risks for Children, pregnant or nursing women.

Schlauchlänge: **10 & 50 CM**



For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16, D-12489 Berlin



PZN **12465603; 12465626**

REF **KBB750-10s ; KBB750-50s**

