

13.1cm

Pe袋尺寸：19x7cm  
说明书尺寸：18.6X13.1cm

说明书要求折叠  
放入单包装内

18.6cm

# KONTICUR® Beinbeutelklettband



## Gebrauchsanweisung Beinbeutelklettband, universal

Gültig für: KBK

### Produktbeschreibung:

Das Beinbeutelklettband ist aus Nylon, Polyester und Elasthan und 68 cm lang, sowie 5 cm breit. Zum individuellen Anpassen an den Beinumfang kann das Klettband in der Länge gekürzt werden. Es ist für den mehrmaligen Gebrauch konzipiert und kann gewaschen werden (Handwäsche 30° – Nicht in den Trockner geben und nicht bügeln).

### Indikationen:

- Sichere Fixierung von Beinbeuteln

### Kontraindikationen:

- Ein- bzw. Abflussstauungen des venösen, arteriellen oder lymphatischen Systems, z. B. Thrombose der Beinvenen

### Anwendung:

1. Legen Sie das Klettband am Ober-/Unterschenkel mit nach außen zeigenden, überlappenden Klettaschen an. Die schmalere, mittlere Lasche zeigt nach oben. Öffnen Sie die Klettaschen und fädeln Sie den Beinbeutel ein. Das Klettband kann individuell gekürzt werden.
2. Das Produkt kann über den normalen Hausmüll entsorgt werden.

### Sicherheitshinweise:

- Vermeiden Sie zu festes Anlegen des Klettbandes und überprüfen Sie die Hautverhältnisse.
- Die Anwendung unseres Befestigungssystems setzt entsprechende Fachkunde voraus. Anwender und / oder deren Betreuungspersonen sind vor dem erstmaligen Gebrauch umfassend zu unterweisen.
- Kontraindikationen sind zu beachten, ebenso die individuellen Pflegehinweise.
- In der Originalverpackung aufbewahren und vor direkten oder indirekten Licht- und Hitzequellen schützen.

	Gebrauchsanweisung beachten		Verwendbar bis	<b>REF</b>	Artikelnummer		Hersteller
	Trocken aufbewahren		Vor Sonnenlicht schützen	<b>LOT</b>	Fertigungsnummer, Charge		Herstelldatum
<b>MD</b>	Ist ein Medizinprodukt	<b>QTY</b>	Anzahl / Stück				



CES945 06/21 Rev. 03

For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Am Studio 16, D-12489 Berlin