



Gebrauchsanweisung für Urinbeutel ohne Ablauf unsteril

Gültig für: KB2001oA

Beschreibung:

Der Urinbeutel ist erhältlich in der Größe 2000ml. Er besteht aus PVC-Folie medizinischer Qualität und setzt sich zusammen aus einem Urinbeutel mit einem Einlass. Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt.

Indikation:

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird. Es ist besonders für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten geeignet.

Kontraindikation: Nein

Nebenwirkungen: Keine

Messfunktion:

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Fixieren Sie den Beutel in Höhe oder unterhalb der Blase.
- Das Austauschen des Beinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, den Beutel fachgerecht entsorgen.

Sicherheitshinweise:

- Nur für den Einmalgebrauch. Nach der Nutzung im Müll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes beeinträchtigen und bis hin zum Funktionsausfall führen.
- Dieses Produkt sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden sein.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder bei hoher Feuchtigkeit lagern.

Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Unsteril



Nicht wiederverwenden



Enthält oder Anwesenheit von Phthalaten



Ist ein Medizinprodukt



Hersteller



Herstellungsdatum (Datumsformat JJJJ-MM)



Verwendbar bis (Datumsformat JJJJ-MM)



Konform zur 93/42/EWG



Artikelnummer



Chargencode



Gebrauchsanweisung beachten



Achtung




Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden



Trocken aufbewahren



Von Sonnenlicht fernhalten

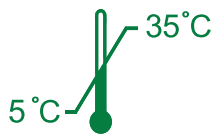

Temperaturbegrenzung



Anzahl / Stück



Contains Phthalates:

There are no known residual risks for Children, pregnant or nursing women.

Schlauchlänge: **90** CM



For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16, D-12489 Berlin



PZN

13827994

REF

KB2001oA