



KBA 06/21 Rev. 04

Gebrauchsanweisung für Bettbeutelabhängung KBA

Gültig für: KBA

Beschreibung:

Die Beutelaufhängung dient zur Fixierung des Bettbeutels am Bett. Die Aufhängung besteht aus Hartplastik. Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I unsteril und ist für den mehrmaligen Gebrauch bestimmt.

Indikation:

Bettbeutelabhängung zur Verwendung bei Bettbeuteln ohne integriertem Aufhänger

Kontraindikation:

Nein

Nebenwirkungen:

Keine

Gebrauchsanweisung:

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Hantieren am Urinbeutel.
- Haken Sie den Bettbeutel an der Bettbeutelabhängung ein
- Platzieren Sie nun den Bettbeutel mittels den am Halter angebrachten Haken am Bett
- Achten Sie darauf den Beutel in Höhe der Blase oder unter der Höhe der Blase aufzuhängen.

Sicherheitshinweise:

- Die Beutelaufhängung ist für den mehrmaligen Gebrauch konzipiert
- Desinfizieren Sie täglich die Aufhängung mit geeignetem Desinfektionsmittel.
- Tauschen Sie die Aufhängung nach ca. 4 Wochen aus, um Materialermüdung vorzubeugen

Lagerung:

- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder in hoher Feuchtigkeit lagern.

FORLIFE

B E R L I N

Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung
beachten



Konform zur 93/42/EWG



Ist ein Medizinprodukt



Chargencode



Hersteller



Herstellungsdatum
(Datumsformat JJJJ-MM)




Verwendbar bis
(Datumsformat JJJJ-MM)



Trocken aufbewahren



Von Sonnenlicht
fernhalten

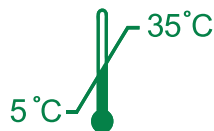

Temperaturbegrenzung



Anzahl / Stück



For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft
für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16, D-12489 Berlin

REF **KBA**

PZN - 12465738