

Gebrauchsanweisung für Einmalkatheter zum intermittierenden Einmal-Katheterismus

Zweckbestimmung:

Der Kath G ist ein gebrauchsfertiger, mit Gleitgel versehener, steriler Katheter und wird für die Einmal-Katheterisierung genutzt.

Kath G kann Patienten helfen, die schmerzhaft oder schwer urinieren, sich leicht zu katheterisieren. Außerdem kann das Produkt zur Blasenreinigung, Entnahme von Urinproben und Entfernung von Blut in der Blase während Operationen verwendet werden.

Benutzergruppe:

Alle Personen, die mental und fingerfertig in der Lage sind, den Katheter nach Anwendungsrichtlinie anzuwenden

Indikationen:

- Neurogene Blasenstörungen
- Hamnverhalt durch Prostatavergrößerung
- Wirbelsäulenverletzungen bzw. angeborene Fehlbildungen z. B. Spina bifida
- allgemeine Blasenfunktionsstörungen

Kontraindikationen:

- PVC- oder Gelallergie
- akute Prostataentzündung
- akute Nebenhodenentzündung
- Harnsteinleiden

Legende:

	Nicht wiederverwenden		Latexfrei		Trocken aufbewahren		Fertigungslosnummer, Charge
	Gebrauchsanweisung beachten		DEHP frei		Sterilisiert mit Ethylenoxid		Hersteller
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Verwendbar bis		Sterilbarriersystem		Medizinprodukt
	Artikelnummer		Anzahl, Stück		Eindeutige Produktidentifizierung		

Anwendung:

1. Waschen Sie sich vor der Durchführung der Katheterisierung gründlich die Hände und finden Sie eine bequeme Position.
2. Desinfektion der äußeren Genitalien:
Bei der Frau ist darauf zu achten, dass der Genitalbereich von den äußeren und inneren Schamlippen zum After hin gereinigt wird.
Beim Mann ist die Vorhaut vor der Genitalwäsche zurückzuziehen. Reinigen Sie zunächst die Eichel und dann die Harnröhrenmündung.
3. Ziehen Sie die Lasche der Sterilverpackung auf und entnehmen Sie den sterilen Katheter.
4. Öffnen Sie die Innenverpackung des Katheters vorerst am unteren Ende an der dafür vorgesehenen perforierten Stelle, bei Bedarf können Sie einen Urinbeutel anschließen.
5. Entfernen Sie nun die Schutzkappe von der Katheterspitze, halten Sie dabei den Katheter am Plastikansatz fest. Schieben Sie den Katheter mit der anderen Hand so weit in die Gelschleuse vor, bis die Spitze des Katheters die Gelschleuse ausfüllt. Die Katheterspitze darf auf keinen Fall aus der Gelschleuse austreten, damit eine Keimeinschleusung in die Harnröhre verhindert wird.
Bei Frauen: Führen Sie die Katheterspitze vorsichtig in die Harnröhre ein und schieben Sie den Katheter so weit in die Blase vor, bis Urin fließt.
Bei Männern: Strecken Sie den Penis etwas nach oben, dadurch wird das Vorschieben des Katheters vereinfacht. Führen Sie die Einführspitze vorsichtig in die Harnröhre ein und schieben Sie den Katheter so weit in die Blase vor, bis Urin fließt.
 Belassen Sie den Katheter in dieser Position bis kein Urin mehr fließt. Der Urin kann über das trichterförmige Ende des Katheters direkt in einen Urinauffangbehälter, in die Toilette oder in einen angeschlossenen Beutel abgelassen werden.
6. Ziehen Sie den Katheter langsam und vorsichtig aus der Harnröhre. Verwerfen Sie die verwendeten Artikel in den Hausmüll.
7. Waschen Sie abschließend Ihre Hände.

Warnhinweise:

Intermittierender Selbstkatheterismus sollte nur nach ärztlicher oder pflegerischer Anleitung durchgeführt werden.

- Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt!
- Dieses Produkt darf nur für die Katheterisierung der Harnröhre genutzt werden! Nutzen Sie den Katheter nicht für andere Zwecke!
- Nicht erneut sterilisieren oder wiederverwenden!
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Verpackung oder das Produkt beschädigt oder verunreinigt ist.
- Nach dem Öffnen der Verpackung Produkt sofort verwenden!
- Nach Verwendung ist das Produkt zu entsorgen!
- Bei schwerwiegenden Verletzungen (Vorkommnis) im Zusammenhang mit der Verwendung dieses Medizinproduktes wenden Sie sich bitte an ihren lokalen Händler oder den Hersteller, sowie an Ihre zuständige örtliche Behörde.

Hinweise für Anwender:

Lässt sich der Katheter nicht einführen und/oder treten Blutungen auf, brechen Sie den Katheterisierungsvorgang ab und wenden sich umgehend an Ihren behandelnden Arzt.

Lagerung:

Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

Spezifikation:

Typ	REF	Größe	Farbcode
Einmalkatheter Kath G Frauen	K102008	8 CH	blau
	K102010	10 CH	schwarz
	K102012	12 CH	weiß
	K102014	14 CH	grün
	K102016	16 CH	orange
	K102018	18 CH	rot
Einmalkatheter Kath G Männer	K104008	8 CH	blau
	K104010	10 CH	schwarz
	K104012	12 CH	weiß
	K104014	14 CH	grün
	K104016	16 CH	orange
	K104018	18 CH	rot