

KONTICUR® Urinal-Kondom



Gebrauchsanweisung für Urinal-Kondom, unsteril

Gültig für: KUK, KUS, KUL jeweils in den Größen 24mm, 28mm, 31mm, 35mm und 40mm

Produktbeschreibung:

Das KONTICUR Urinal-Kondom ist ein selbsthaftendes Urinal-Kondom aus latexfreiem Material. Aufgrund des auf der Innenseite verwendeten medizinischen Klebers wird eine sichere und komfortable Haftung des Urinal-Kondoms am Penis gewährleistet. Es handelt sich um ein Medizinprodukt der Klasse I und ist nicht steril.

Die Urinableitung ist für Männer wie ein Kondom zu benutzen. Durch die Form der externen Ableitung hat der Patient keine Irritationen in der Harnröhre und die Versorgung ist einfach zu entfernen.

Indikationen:

- Harninkontinenz bei Männern

Kontraindikationen:

- Allergischen Reaktionen aufgrund des Klebstoffes

Anwendung:

1. Vor dem Gebrauch die Hände waschen.
2. Den Penis waschen, abtrocknen und anschließend den Penisschaft rasieren.
3. Das Urinal-Kondom entlang des Penisschaftes komplett entrollen.

4. Den Urinbeutel am Bein, Bett oder Rollstuhl des Patienten fixieren, um ein Verdrehen des Schlauches oder des Kondoms zu verhindern.
5. Den Schlauch des Urinbeutels mit dem Abflussstutzen des Kondoms verbinden. Das Ablassventil des Urinbeutels muss verschlossen sein.
6. Zum Entfernen das Urinal-Kondom vom Penisschaft abrollen. Es kann warmes Wasser mit Seife oder ein Pflasterentferner-Spray genutzt werden.
7. Das Kondom im Hausmüll entsorgen (nicht in die Toilette!) und anschließend die Hände waschen.

Sicherheitshinweise:

- Vor der Benutzung die korrekte Größe bestimmen
- Nur für den Einmalgebrauch
- Nicht benutzen, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt wurde

Lagerung:

Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern.

	Nicht wiederverwenden		Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Trocken aufbewahren		Vor Sonnenlicht schützen
	Nicht steril		Fertigungslosnummer, Charge		Herstelldatum		Gebrauchsanweisung beachten
	Temperaturbegrenzung		Hände waschen		Verwendbar bis		Hersteller
	Artikelnummer		Hersteller		Ist ein Medizinprodukt		Anzahl / Stück



For Life Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH
Am Studio 16, D-12489 Berlin