

Absorb® – Hoch saugfähige Wundauflage

Beschreibung

Die hoch saugfähige Wundauflage Absorb® ist eine sterile Wundauflage zur Versorgung stark exsudierender Wunden und besteht aus einer luftdurchlässigen und wasserdichten Vliesschicht, einem hoch saugfähigen Pad und einer weiteren hydro-penetriierenden Vliesschicht. Der dreilagige Aufbau erleichtert das Flüssigkeitsmanagement, indem ein Wundmilieu mit optimaler Feuchte geschaffen wird, welches die Wundheilung und einen schnelleren Wundverschluss fördert. Das saugfähige Pad zeichnet sich durch hervorragende Absorptionseigenschaften aus und bindet Exsudat zuverlässig. Somit wird das Risiko der Mazeration und Schädigung der wundumgebenden Haut minimiert.

Indikationen

Die hoch saugfähige Absorb® Wundauflage ist für die Versorgung mäßig bis stark exsudierender Wunden bestimmt, einschließlich: Beingschwüre, Dekubitus, diabetische Fußgeschwüre und sekundär heilender Wunden.

Anwendungshinweise

1. Nachdem die Wunde gereinigt und desinfiziert wurde, wählen Sie eine passend große Wundauflage aus, die ausreichend Platz zum Wundrand bietet.
2. Die hoch saugfähige Absorb® Wundauflage kann entweder als Primärverband oder als sekundäre Wundauflage verwendet werden. Wenn sie als Primärverband genutzt wird, muss die hoch saugfähige Absorb® Wundauflage in direkten Kontakt zum Wundgrund gebracht werden, um sicherzustellen, dass die Wundflüssigkeit absorbiert wird. Anschließend die Auflage mit Bandage, Strumpf, Pflaster oder Verband fixieren.
3. Die Häufigkeit des Verbandswechsels hängt von der Menge des Exsudats ab.
4. Die Entfernung der Wundauflage wird erleichtert, wenn sie zuvor mit Kochsalzlösung durchfeuchtet wird.
5. Die Entsorgung kann über den gewöhnlichen Restmüll erfolgen. Bei Kontamination müssen die geltenden lokalen Bestimmungen befolgt werden.

Kontraindikationen

1. Das Produkt darf nicht für trockene oder nur geringfügig exsudierende Wunden, Augen, Schleimhäute oder in Wundhöhlen verwendet werden, da die Wundauflage bei der Flüssigkeitsaufnahme anschwillt. Nicht bei Verbrennungen dritten Grades verwenden.
2. Die hoch saugfähige Absorb® Wundauflage darf nicht bei Personen mit bekannter Allergie oder Überempfindlichkeit gegen die Wundauflage oder deren Bestandteile angewendet werden.

Achtung









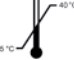





1. Nicht wiederverwenden. Sehen Sie von der Verwendung der Wundauflage ab, wenn die sterile Verpackung beschädigt oder bereits geöffnet ist.
2. Wundauflage nicht zurechtschneiden, die Abdeckung muss unversehrt bleiben.

Absorb® – Hoch saugfähige Wundauflage

Produktspezifikationen

Produktname – Produktgruppe	Artikelnummer	Größen
PLUSCUR Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1010	125x125 (100x100) mm
PLUSCUR Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1020	125x230 (100x200) mm
PLUSCUR Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1727	200x300 (170x270) mm
PLUSCUR Absorb Superabsorbierender Wundverband ohne Kleberand	PSABNB1737	200x400 (170x370) mm

Erklärung der auf dem Etikett verwendeten Grafiken, Symbole und Abkürzungen

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Nicht wiederverwenden		Fertigungslosnummer, Charge
	Gebrauchsanweisung beachten		Verwendbar bis
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden		Artikelnummer
	Sterilisiert mit Ethylenoxid		CE-Kennzeichen mit Kennnummer der benannten Stelle
	Temperaturbegrenzung		Trocken aufbewahren
	Hersteller		Medizinprodukt
	Herstellungsdatum		Sterilbarriersystem

Aufbewahrung: Bitte bewahren Sie das Produkt an einem kühlen und trockenen Ort und geschützt vor direkter Lichteinstrahlung auf.

Haltbarkeitsdauer: 3 Jahre ab Herstellungsdatum.

Hersteller: For Life - Produktions- und Vertriebsgesellschaft für Heil- und Hilfsmittel mbH

Anschrift: Am Studio 16, 12489 Berlin, Deutschland, Service-Hotline: 0800 – 872 24 36, www.forlife.info